


NANO

DBP-2242

HEALTH
CHECK



Upute za uporabu

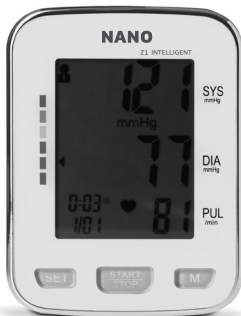

NANO Z1 INTELLIGENT

Potpuno automatski tlakomjer za zapešće

Oznaka: DBP-2242

Sadržaj

Sigurnosne napomene.....	03
Ilustracija uređaja.....	07
Važne upute za mjerenje.....	10
Brzo pokretanje.....	11
Rukovanje uređajem.....	13
Umetanje baterija.....	13
Postavke sustava.....	14
Postavljanje tlakomjera.....	17
Mjerenje.....	19
Isključivanje.....	24
Provjera memorije i prosjeka zadnja tri mjerenja.....	25
Brisanje memorije.....	27
Indikator slabe baterije.....	28
Otklanjanje problema.....	29
Informacije o krvnom tlaku.....	30
Pitanja o krvnom tlaku i odgovori.....	34
Održavanje.....	36
Specifikacije.....	40
Jamstvo.....	44

Sigurnosne napomene

Hvala što ste kupili NANO Z1 INTELLIGENT tlakomjer za zapešće. Uređaj je izrađen uporabom pouzdanih sklopova i izdržljivih materijala. Ako se ispravno koristi, ovaj uređaj će vam omogućiti godine zadovoljavajućeg korištenja.

Ovaj uređaj namijenjen je neinvazivnom mjerenju sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka te otkucaja srca odraslih osoba oscilometrijskom metodom. Uređaj nije namijenjen za uporabu na dojenčadi i djeci. Uređaj je namijenjen za kućnu ili kliničku uporabu. Sve vrijednosti mogu se očitati na jednom LCD zaslonu. Mjerni položaj odnosi se samo na zapešće odrasle osobe.

Molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe uređaja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu. Za specifične informacije o vašem krvnom tlaku, molimo da KONZULTIRATE SVOG LIJEČNIKA.

Kako biste izbjegli rizik i oštećenja, pridržavajte se svih mjera opreza. Koristite uređaj isključivo na način za koji je namijenjen. Pročitajte sve upute prije upotrebe.

Sigurnosne napomene

KORIŠTENI ZNAKOVI UPOZORENJA I SIMBOLI	
	Oprez
	Obavezno
	Zabranjeno
	Uređaj tipa BF
	Provjerite upute za uporabu
	Serijski broj
	Zbrinite iskorišteni proizvod na mjestu za reciklažu ili prikupljanje u skladu s lokalnim pravilima.

Sigurnosne napomene

 Opres	
Osobe s ozbiljnim poremećajima cirkulacije mogu iskusiti neugodu. Posavjetujte se s liječnikom prije uporabe.	
Obratite se svom liječniku ako rezultati mjerenja redovito ukazuju na abnormalna očitavanja. Ne pokušavajte sami liječiti ove simptome bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.	
Proizvod je namijenjen isključivo za namjeravanu upotrebu. Ne zlorupotrebljavajte uređaj ni na koji način.	
Proizvod nije namijenjen dojenčadi ili pojedincima koji ne mogu izraziti svoje namjere.	
Ne rastavljajte i ne pokušavajte sami popraviti uređaj.	
Ne koristite mobilne telefone i druge uređaje koji stvaraju jaka električna ili elektromagnetska polja u blizini uređaja jer mogu uzrokovati netočna očitavanja i smetnje ili postati izvor smetnji za uređaj.	

Sigurnosne napomene



Mjere opreza s baterijom

Ne koristite stare i nove baterije istovremeno.

Zamijenite baterije kada se na zaslonu pojavi „Indikator slabe baterije“ 

Pazite da je polaritet baterije u ispravnom položaju.


Ne miješajte različite vrste baterija. Preporuča se upotreba dugotrajnih alkalnih baterija.

Izvadite baterije iz uređaja ako ga ne koristite dulje od 3 mjeseca.

Zbrinite baterije na odgovarajuć način; pridržavajte se lokalnih zakona i propisa.


Ilustracija uređaja

Uređaj za mjerenje

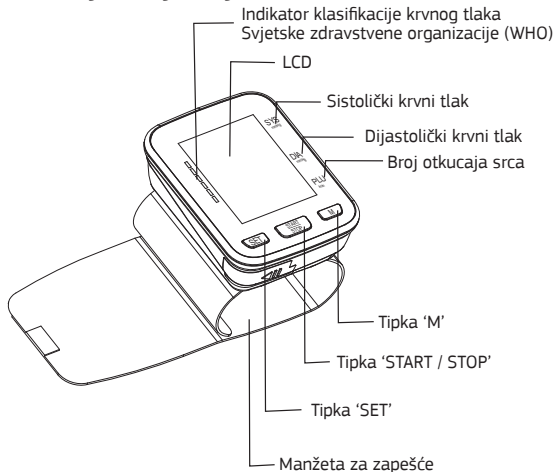

Ilustracija uređaja

Zaslon

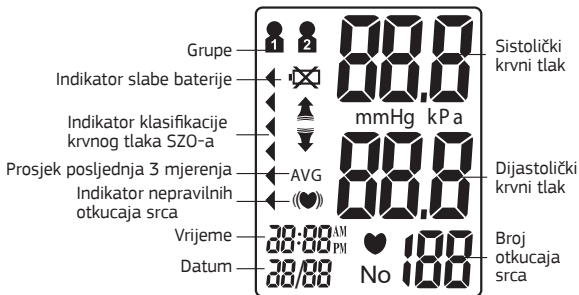


Ilustracija uređaja

Sadržaj


1. Uređaj za mjerenje



2. Upute za uporabu

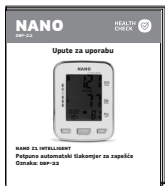

3. Plastična kutija za pohranu

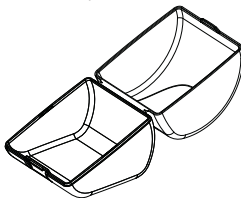


Važne upute za mjerenje

1. Izbjegavajte jesti, vježbati i kupati se 30 minuta prije mjerenja.
2. Sjedite u mirnom okruženju barem 5 minuta prije mjerenja.
3. Nemojte stajati za vrijeme mjerenja. Sjedite u opuštenom položaju i držite zapešće u ravnini sa srcem.
4. Izbjegavajte govoriti ili pomicati dijelove tijela tijekom mjerenja.
5. Izbjegavajte jake elektromagnetske smetnje kao što su mikrovalne pećnice i mobilni telefoni tijekom mjerenja.
6. Pričekajte najmanje 3 minute prije ponovnog mjerenja.
7. Pokušajte mjeriti krvni tlak svakog dana u isto vrijeme radi dosljednosti.
8. Usporedbe mjerenja mogu se vršiti samo kada se tlakomjer koristi na istom zapešću, u istom položaju i u isto doba dana.
9. Ovaj tlakomjer ne preporuča se osobama s teškom aritmijom.
10. Ne koristite ovaj tlakomjer ako je oštećen.


Brzo pokretanje

1. Umetnite baterije (vidi sliku A)

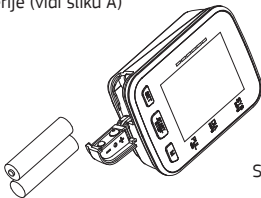


Slika A

2. Maknite odjeću sa zapešća. (vidi sliku B)
3. Odmarajte nekoliko minuta prije mjerenja. Omotajte manžetu oko lijevog zapešća (vidi sliku C).

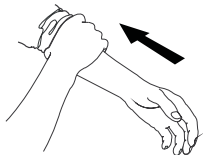


Slika B

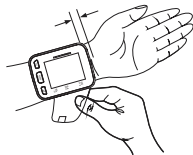


Slika C

Brzo pokretanje

4. Sjednite u udoban položaj i postavite zapešće u visinu srca. (vidi sliku D)
5. Pritisnite tipku „START/STOP“ za početak mjerenja. (vidi sliku E)

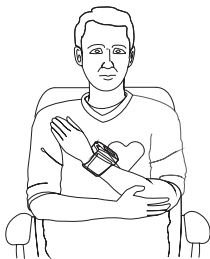

Slika D

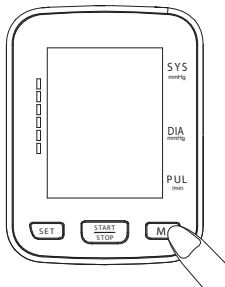


Slika E

Rukovanje uređajem

Umetanje baterija

Podignite poklopac za baterije u smjeru strelice.

Umetnite 2 nove AAA alkalne baterije pazeći na polaritet. Zatvorite poklopac za baterije.

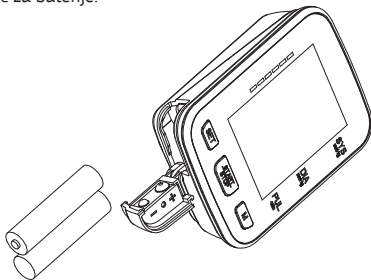

Napomena:

- 1) Zamijenite baterije kada se na zaslonu pojavi  „Indikator slabe baterije“.
- 2) Ako uređaj ne koristite tijekom duljeg vremenskog perioda, izvadite baterije.

Rukovanje uređajem


Postavke sustava

Kada je uređaj isključen, pritisnite tipku „SET“ kako biste pokrenuli postavke sustava. Ikona za memorijsku grupu počinje treperiti.

1. Odaberite memorijsku grupu

Dok je sustav u načinu rada za postavke, možete grupirati rezultate mjerenja u 2 različite skupine. Time omogućavate više korisnika da pohrane svoje pojedinačne rezultate mjerenja (do 60 rezultata mjerenja po grupi).

Pritisnite tipku „M“ za odabir postavke grupe. Rezultati mjerenja će se automatski pohraniti u svaku odabranu grupu.

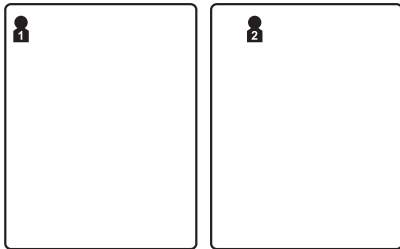

Rukovanje uređajem

2. Postavljanje datum/vremena


Ponovno pritisnite tipku „SET“ za postavljanje datuma i vremena. Prvo odaberite godinu podešavanjem tipke „M“. Pritisnite tipku „SET“ ponovno za odabir trenutnog mjeseca. Nastavite s podešavanjem dana, sata i minute na isti način. Svaki puta kada pritisnete tipku „SET“, zaključavate svoj odabir i nastavljate na drugu kategoriju (mjesec, dan, sat, minuta).



Rukovanje uređajem

3. Postavke formata vremena

Pritisnite tipku „SET“ ponovno za postavljanje formata vremena. Postavite format vremena podešavanjem tipke „M“. EU znači standardno europsko vrijeme, US znači američko vrijeme.

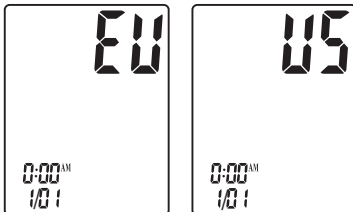

4. Spremanje postavki

Dok se nalazite u bilo kojem načinu rada s postavkama, pritisnite tipku „START/STOP“ kako biste ugasili uređaj. Sve postavke bit će spremljene.


Napomena: Uređaj će automatski spremiti sve informacije i isključiti se ako ga ostavite u mirovanju 3 minute.

Rukovanje uređajem

Postavljanje tlakomjera

Ne stavljajte tlakomjer preko odjeće. Ako nosite majicu dugih rukava, obavezno ih podignite do nadlaktice.

Postavite tlakomjer na zapešće kako je prikazano. Čvrsto zategnite manžetu kako uređaj ne bi mogao skliznuti.

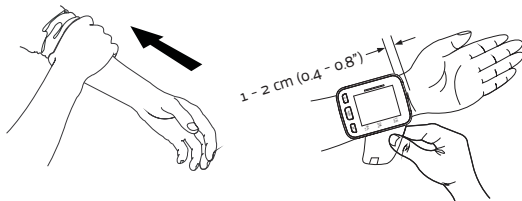

Rukovanje uređajem

Nemojte stajati za vrijeme mjerenja. Sjedite u udobnom položaju i postavite zapešće u visinu srca.




Rukovanje uređajem

Mjerenje

1. Uključivanje

Pritisnite i držite tipku „START/STOP“ do oglašavanja zvučnog signala. LCD zaslon će se pojaviti na sekundu dok uređaj izvršava brzu dijagnostiku. Dugi ton označava da je uređaj spreman za mjerenje.

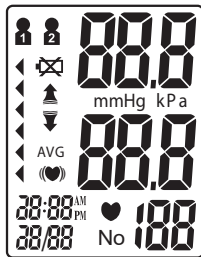

Napomena: Uređaj neće funkcionirati ako u manžeti ima zaostalog zraka iz prethodnog mjerenja. Ikona  će se prikazati na LCD zaslonu dok se pritisak ne stabilizira.

Rukovanje uređajem

2. Punjenje zrakom

Prvim punjenjem zraka postiže se vrijednost od 190mmHg. Ako je sistolički krvni tlak trenutnog korisnika veći od 190mmHg, uređaj će automatski dopuniti zrak do potrebne vrijednosti.




Napomena: Punjenje zrakom će postepeno prestajati i stati ako manžeta nije ispravno postavljena na zapešće. U tom slučaju pritisnite tipku „START/STOP“ kako biste isključili uređaj.

Rukovanje uređajem

3. Mjerenje

Nakon napuhavanja manžete, zrak će se postupno ispuštati kako je navedeno odgovarajućim ventilom za punjenje manžete zrakom. Ikona "♥" će početi treperiti istovremeno na zaslonu što znači da su detektirani otkucaji srca.

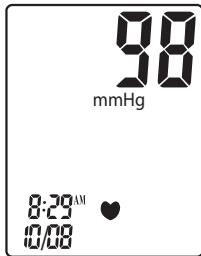


Napomena: Ostanite opušteni tijekom mjerenja. Izbjegavajte govoriti ili pomicati dijelove tijela.

Rukovanje uređajem

4. Prikaz rezultata

Tri kratka tona oglasit će se kada je mjerenje završeno. Na zaslonu se prikazuju rezultati mjerenja sistoličkog i dijastoličkog tlaka. Pored odgovarajuće klasifikacije SZO-a pojavit će se indikator koji predstavlja trenutno mjerenje.

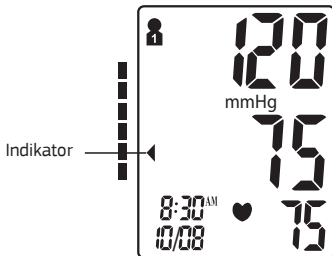

Rukovanje uređajem

Napomena:

Provjerite stranice 31 - 32 za pojedinosti o klasifikaciji krvnog tlaka SZ0-a.

Indikator nepravilnog rada srca

Ako tlakomjer detektira nepravilan ritam srca dva ili više puta tijekom postupka mjerenja, na zaslonu će se pojaviti simbol za nepravilan rad srca "((♥))" zajedno s rezultatima mjerenja. Nepravilan rad srca definira se kao srčani ritam koji je 25% sporiji ili brži od prosječnog ritma detektiranog tijekom mjerenja sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka. Posavjetujte se s liječnikom ako se uz vaše rezultate često pojavljuje simbol za nepravilan rad srca "((♥))".

5. Brisanje/spremanje rezultata mjerenja

Korisnik može izbrisati svoj trenutni rezultat zbog nepovoljnih uvjeta mjerenja ili bilo kojeg drugog razloga. Za brisanje posljednjeg rezultata mjerenja, pritisnite tipku „SET“ nakon prikaza rezultata. Ako ne izbrišete rezultat, on će se automatski spremiti prema datumu u prethodno podešenu memorijsku grupu.

Rukovanje uređajem

Napomena: Obavezno odaberite odgovarajuću memorijsku grupu prije mjerenja.

Ako broj mjerenja premaši dostupnih 60 mjerenja po grupi, prvo će se prikazivati najnoviji rezultati čime se miču najstariji rezultati mjerenja.

Isključivanje

Tipka „START/STOP“ može se pritisnuti za isključivanje uređaja u bilo kojem načinu rada.

Uređaj će se sam isključiti nakon 3 minute neaktivnosti u bilo kojem načinu rada.

Sigurnosne mjere opreza:

Ako pritisak u manžeti postane prevelik tijekom mjerenja, pritisnite tipku „START/STOP“ kako biste isključili uređaj.


Pritisak u manžeti će brzo pasti kada se uređaj isključi.

Rukovanje uređajem

Provjera memorije i prosjeka zadnja 3 mjerjenja


Pritisnite tipku „M“ dok je uređaj isključen kako biste aktivirali prikaz na zaslonu. Nakon što uređaj izvrši samo-dijagnostiku, na zaslonu će se prikazati prosječni rezultati zadnja 3 mjerjenja u zadnjoj korištenoj grupi. Simbol " **AVG** " će se prikazati uz odgovarajući indikator tlaka prema SZO-u.

Za provjeru prosječnog rezultata drugih grupa, odaberite željenu grupu prije aktiviranja tipke „M“ dok je uređaj isključen (vidi „odabir memorijske grupe“ na stranici 14).

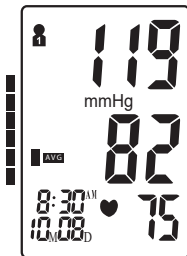

Rukovanje uređajem

Pritisnite tipku „M“ ponovno za provjeru rezultata prošlih mjerenja. Nakon aktiviranja rezultata ispitivanja, možete pritisnuti tipku „M“ za pregled svih rezultata mjerenja pohranjenih u memoriji. LCD zaslon će prikazati zadnji rezultat kao mjerenje NO: 01.

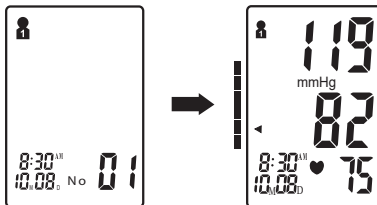


Napomena: Prošli rezultati bit će prikazani samo iz zadnje korištene memorijske grupe. Za provjeru prošlih rezultata u drugim memorijskim grupama, morate prvo odabrati željenu memorijsku grupu i zatim isključiti uređaj. (vidi odabir memorijske grupe na stranici 14).

Rukovanje uređajem

Brisanje memorije

Memoriju odabrane grupe moguće je izbrisati dok ste u načinu rada za provjeru memorije. Pritisnite i držite tipku „SET“ oko 3 sekunde da biste izbrisali sva mjerenja iz memorije odabrane grupe. Tlakomjer će se oglasiti zvučnim signalom koji označava uspješno obrisanu memoriju a zatim se prebaciti u način rada za mjerenje. Da biste izbrisali mjerenja iz drugih grupa, molimo da provjerite dio „odabir memorijske grupe“ na stranici 14. Zatim pritisnite tipku „START/STOP“ da biste ugasili uređaj.

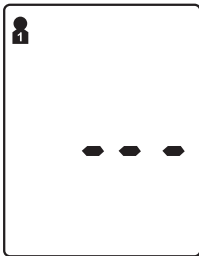


Napomena: Memoriju nije moguće povratiti nakon brisanja.

Rukovanje uređajem

Indikator slabe baterije

4 kratka tona upozorenja oglašavaju se kada je baterija istrošena i nije moguće napuniti manžetu zrakom i izvršiti mjerenje. Ikona "  " prikazuje se istovremeno tijekom oko 5 sekundi prije isključivanja. U ovom trenutku potrebno je zamijeniti baterije. Tijekom ovog procesa neće doći do gubitka memorije.

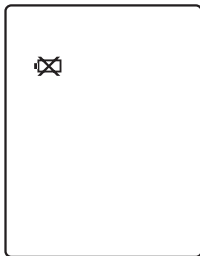

Rukovanje uređajem

Otklanjanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Rezultati mjerenja krvnog tlaka ne nalaze se unutar uobičajenog raspona	Manžeta je prečvrsto ili neispravno postavljena na zapešće	Ponovno čvrsto postavite manžetu na zapešće i pazite da uređaj ne sklizne (vidi str.12)
	Netočni rezultati mjerenja zbog pomicanja tijela ili tlakomjera	Sjedite u opuštenom položaju sa zapešćem postavljenim u razini srca. Izbjegavajte govoriti ili pomicati dijelove tijela tijekom mjerenja (vidi str. 10)
"Err" prikazano na zaslonu	Manžeta se nije ispravno napuhala	Provjerite je li manžeta pravilno postavljena i ponovno izvedite mjerenje
	Neppravilno rukovanje	Pročitajte pažljivo upute i ispravno ponovite mjerenje.
	Rezultat mjerenja je iznad 300 mmHg	Pročitajte pažljivo upute i ispravno ponovite mjerenje.


Informacije o krvnom tlaku

Krvni tlak

Krvni tlak je sila kojom krv pritišće stijenke arterija. Obično se mjeri u milimetrima žive (mmHg). Sistolički krvni tlak je maksimalna sila koja djeluje na stijenke žila kod svakog otkucaja srca. Dijastolički tlak je sila koja djeluje na stijenke žila kada se srce odmara između otkucaja.

Krvni tlak svake osobe često se mijenja tijekom dana. Uzbudjenje i nape-
tost mogu uzrokovati porast tlaka dok konzumacija alkohola i kupanje
mogu uzrokovati pad tlaka. Određeni hormoni, poput adrenalina (koji
vaše tijelo luči kad je pod stresom) mogu uzrokovati stezanje krvnih žila,
što dovodi do porasta krvnog tlaka.

Ako te izmjerene vrijednosti postanu previsoke, to znači da srce radi
napornije nego što bi trebalo.

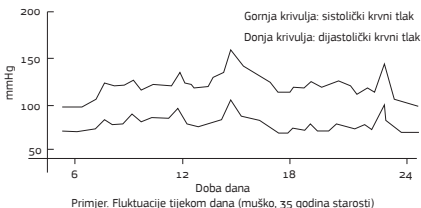


Informacije o krvnom tlaku

Indikator klasifikacije krvnog tlaka prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji

NANO Z1 INTELLIGENT DBP-2242 je opremljen indikatorom klasifikacije na temelju utvrđenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Tablica u nastavku (označena bojom na tlakomjeru) označava rezultate mjerenja.

■	— Teška hipertenzija
■	— Srednja hipertenzija
■	— Blaga hipertenzija
■	— Viši normalni tlak
■	— Normalni tlak
■	— Optimalni tlak

Blaga hipertenzija

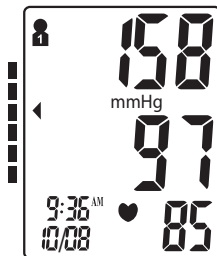


■ : Indikator klasifikacije krvnog tlaka

Informacije o krvnom tlaku

Zdravstveni podsjetnik

Hipertenzija je opasna bolest koja može utjecati na kvalitetu života. Može uzrokovati mnoge probleme, uključujući zatajenje srca, zatajenje bubrega i cerebralno krvarenje. Održavanjem zdravog načina života i redovitim posjetima liječniku, hipertenzija i povezane srčane bolesti mnogo se lakše kontroliraju i dijagnosticiraju u ranijim stadijima.

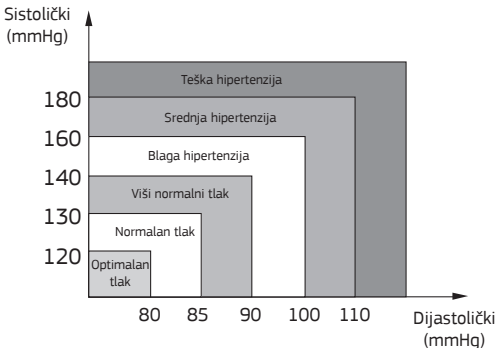

Informacije o krvnom tlaku

Napomena:

Nemojte paničariti ako mjerenje pokaže abnormalan rezultat. Bolji indikator vrijednosti tlaka pojedinca dobiva se nakon 2-3 očitavanja svakoga dana u isto vrijeme tijekom duljeg perioda. Posavjetujte se s liječnikom ako rezultati mjerenja i dalje budu abnormalni.

Pitanja o krvnom tlaku i odgovori

- P:** Koja je razlika između mjerenja krvnog tlaka kod kuće i u profesionalnoj zdravstvenoj ustanovi?
- O:** Smatra se da mjerenje krvnog tlaka kod kuće daje točnije rezultate jer bolje odražava vaš svakodnevni život. Rezultati mogu biti povišeni kod mjerenja u klinici ili drugom okruženju zdravstvene srbí. To je poznato kao hipertenzija bijele kute i može biti uzrokovano osjećajem tjeskobe ili nervoze.

Napomena:

Abnormalni rezultati mogu biti uzrokovani:


1. neispravnim postavljanjem manžete
manžeta mora prijanjati uz zapešće, ne smije biti prečvrsta niti prelabava.
2. neispravnim položaj tijela
pazite da vaš položaj tijela bude uspravan.
3. osjećajem tjeskobe ili nervoze
udahnite 2-3 puta, pričekajte nekoliko minuta i nastavite mjerenje.

Pitanja o krvnom tlaku i odgovori

- P:** Što uzrokuje različite rezultate?
- O:** Krvni tlak varira tijekom dana. Mnogi faktori, uključujući prehranu, stres, postavljanje manžete, itd. mogu utjecati na krvni tlak osobe.
- P:** Trebam li staviti manžetu na lijevo ili desno zapešće? Koja je razlika?
- O:** Bilo koje zapešće može se koristiti za mjerenje, međutim za usporedbu rezultata potrebno je koristiti rezultate s istog zapešća. Mjerenje na lijevom zapešću može dati preciznije rezultate jer se nalazi bliže srcu.
- P:** Koje je najbolje doba dana za mjerenje?
- O:** Ujutro ili bilo koje doba dana kada se osjećate opušteno i smireno.

Održavanje

1. Nemojte ispuštati, udarati ni bacati uređaj.

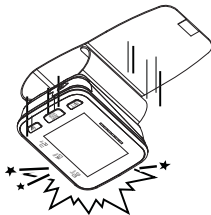


2. Izbjegavajte ekstremne temperature. Ne koristite na otvorenom.



Održavanje


3. Za čišćenje koristite meku tkaninu i lagano obrišite uređaj koristeći nježni deterdžent. Vlažnom krpom uklonite prljavštinu i višak deterdženta.

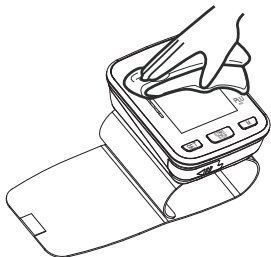

4. Čišćenje manžete: ne namačite manžetu u vodi! Nanesite malu količinu medicinskog alkohola na meku krpu i očistite površinu manžete. Navlažite krpu vodom i obrišite. Pustite da se manžeta sama osuši na sobnoj temperaturi.

Održavanje


5. Ne koristite benzin, razrjeđivače ili slična otapala.

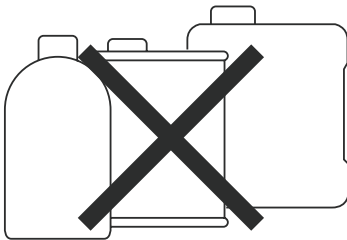

6. Izvadite baterije ako uređaj ne koristite dulje vrijeme.

Održavanje

7. Ne rastavljajte uređaj.

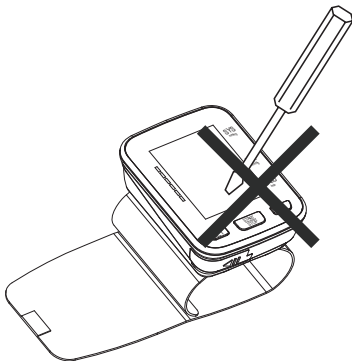

8. Preporuča se kontrola rada uređaja svakih 2 godine.

9. Očekivani vijek trajanja: oko tri godine pri 10 mjerenja dnevno.

Specifikacije

Opis proizvoda	Potpuno automatski tlakomjer za zapešće	
Model	NANO Z1 INTELLIGENT DBP-2242	
Zaslon	LCD digitalni zaslon veličine: 49mm×38mm	
Metoda mjerenja	Oscilometrijska metoda	
Raspon mjerenja	Tlak	0 mmHg~300 mmHg
	Puls	30 do 180 otkucaja/min
Točnost mjerenja	Tlak	±3 mmHg
	Puls	±5%
Punjenje zrakom	Automatsko punjenje zrakom	
Memorija	120 mjerenja u 2 grupe s datumom i vremenom	
Funkcija	Detekcija nepravilnog rada srca	
	Indikator klasifikacije prema SZO-u	
	Prosjek rezultata zadnja tri mjerenja	
	Detekcija slabe baterije	
	Automatsko isključivanje	

Specifikacije

Napajanje	2 alkalne baterije veličine AAA	
Vijek trajanja baterije	Oko 2 mjeseca uz 3 mjerenja dnevno	
Težina uređaja	Oko 115g (4.06 oz.) (bez baterija)	
Dimenzije jedinice	Oko 84mm×64mm×29mm (3.3" ×2.52" ×1.14")(D x Š x V)	
Opseg manžete	Oko 75 (Š)×300(D) mm Odgovara zapešću opsega 13.5-21.5 cm(5.3"-8.5")	
Radni uvjeti	Temperatura	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
	Vlažnost	15% ~ 90%RH
	Tlak	Atmosferski pritisak
Uvjeti skladištenja	Temperatura	-200~55°C (-4°F~131°F)
	Vlažnost	15% ~ 90%RH
Stupanj zaštite elektroničke opreme	IP 22	
Klasifikacija	Oprema tipa BF s unutarnjim napajanjem 	

Specifikacije

Ovaj tlakomjer je u sukladnosti s europskim propisima. Ovaj tlakomjer također je u sukladnosti sa sljedećim normama (uključujući, bez ograničavanja):

Sigurnosna norma: EN 60601-1 Medicinska električna oprema dio 1:
Opći sigurnosni zahtjevi

EMC norma: EN 60601-1-2 Medicinska električna oprema, dio 1-2:
Opći sigurnosni zahtjevi - dodatna norma: Elektromagnetska
kompatibilnost – Zahtjevi i ispitivanja

Standardi izvedbe: EN 1060-1 Neinvazivni sfigmomanometri – Opći
zahtjevi

EN1060-3 Neinvazivni sfigmomanometri – dodatni zahtjevi za
elektromehaničke sustave za mjerenje krvnog tlaka.

EN 1060-4 Neinvazivni sfigmomanometri – postupci ispitivanja za
određivanje ukupne točnosti sustava automatiziranih neinvazivnih
sfigmomanometara.

Specifikacije

Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda (Električna i elektronička otpadna roba)



Ova oznaka na proizvodu označava da se ne smije odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom po isteku svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili potencijalnu štetu po okoliš ili ljudsko zdravlje, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte. Prilikom odlaganja ove vrste proizvoda, kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen ili se obratite uredu lokalne uprave za informacije o zbrinjavanju ovog proizvoda u ekološkom reciklažnom centru.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svog dobavljača i provjeriti uvjete kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom prilikom odlaganja. Ovaj proizvod ne sadrži opasne materijale.

CE 0197



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima MDD 93/42/EEC, „0197“ je identifikacijski broj obavještajnog tijela

Joytech healthcare Co.,Ltd
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development
Zone,311100, Hangzhou, Kina



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Hamburg)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Njemačka

Jamstvo

Jamstvo za tlakomjer je **3 godine** od datuma kupnje. Ukoliko tlakomjer ne radi ispravno zbog neispravnih komponenti ili loše izrade, mi ćemo ga popraviti ili besplatno zamijeniti. Jamstvo ne pokriva štetu nastalu na tlakomjeru zbog nepravilnog rukovanja. Molimo obratite se lokalnom prodavaču za pojedinosti.

TIP / MODEL PROIZVODA: _____

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (NA STRAŽNJOJ STRANI PROIZVODA): _____

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE: _____

OPIS KVARA: _____

IME I PREZIME KUPCA: _____

Uvoznik i distributer za Hrvatsku:

Medikor d.o.o.

Jaruščica 9E, 10000 Zagreb

Tel: 01/3689 666

Servis:

Medaž d.o.o.

Maksimirska 68, 10000 Zagreb

Tel: 01/2301 795